

**Eyerising
Myproclear™**

MİYOPİ KONTROL CİHAZI

Görme duyusu ne kadar erken korunursa
gelecek o kadar parlak olur.



senomed
international

 **Eyerising**
INTERNATIONAL
The vision to change the world

Güvenilir sonuçlar için klinik olarak test edildi

Eyerising Myproclear, miyopinin ilerlemesini %87,7'ye varan oranda yavaşlatarak miyopi tedavisinde etkili olduğu yayınlanan klinik çalışmalarla kanıtlanmış bir cihazdır.1 RLRL tedavisinin etkinliği ve güvenliği, devam eden kapsamlı bir klinik çalışma programı ile doğrulanmıştır. Önde gelen hakemli dergilerde yayınlanan sonuçlar, >%75 uyumla Eyerising Myproclear RLRL tedavisinin miyopinin ilerlemesini kontrol altına alabileceğini göstermektedir.1



İlaç yok



Enjeksiyon yok



Lens yok



Bilinen önemli yan etkisi yok

Uluslararası onaylar ve ruhsatlandırma durumu

Eyerising Myproclear, Avrupa ve Avustralya genelindeki 30'dan fazla ülkede tıbbi düzenleyiciler tarafından gerekli görülen kalite, güvenlik ve etkinlik standartlarını karşılamaktadır. Eyerising Myproclear CE (AB), medsafe (Yeni Zelanda) ve MHRA (İngiltere) tarafından tıbbi cihaz olarak onaylanmıştır, yakında başka ruhsatlandırma onayları da beklenmektedir. Eyerising International, yetkilendirilmiş kuruluş BSI tarafından düzenlenen ISO 13485:2016 belgesine sahiptir.

Referanslar:

Jiang, Yu, et al. "Effect of repeated low-level red-light therapy for myopia control in children: a multicenter randomized controlled trial." *Ophthalmology* 129.5 (2022): 509-519.

Dünyayı değiştiren evde miyopluk tedavisi Eyerising Myproclear hakkında daha fazla bilgi için ekibimize iletişime geçin.

Merkez Ofis/Head Office:

Cevizli Mah. Tansel Cad.
Bulut Plaza No: 12/18 K: 3 D: 22/23
Maltepe/İSTANBUL

Antalya Ofis/Antalya Office:

Tahilpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı
Gazihan İş Merkezi No: 19/603
Muratpaşa/ANTALYA

+90 242 349 45 50
+90 216 771 98 81

info@senomedinternational.com
www.senomedinternational

Kapalı mekanlarda zaman geçirmek eğlenceli olabilir ama kapalı mekanlarda faza zaman geçirmek miyopi vakalarında hızlı artışa yol açıyor.

Görme yeteneğimiz, dünyayı öğrenip anlamak için hayati önemdedir ve dopdolu verimli hayatlar yaşama potansiyelimizi büyük ölçüde etkiler.

Çocuğumuza miyop teşhisi konulduğunda ilerlemesini erkenden yavaşlatmak çok önemlidir. Ne kadar erken kontrol altına alınırsa yetişkinliğe kadar uzun vadeli görme ve yaşam kalitesini devam ettirme şansımız o kadar artar. Bir dizi miyop tedavisi mevcut olmakla birlikte bunların bazıları girişimsel olabilir ve bu yüzden çocuklarda, özellikle çok küçük çocuklarda uygulanabilir değildir. Bu da çocuğunuz ve doktorunuz için seçenekleri sınırlandırabilir.

Eyering International olarak yaşamı değiştiren bir etki yaratması için miyopinin erken, kolay ve etkili bir şekilde kontrol altına alındığı bir dünya görüyoruz.



Evde tekrarlanan düşük seviyeli kırmızı ışık miyopi tedavisi

Eyering International'ın çocukluk dönemi miyopisine karşı yürütülen mücadeleye öncülük etme kararlılığı, miyopinin ilerlemesini yavaşlatan son derece etkili ve çocuk dostu bir yöntem olan patentli Myproclear Tekrarlanan Düşük Seviyeli Kırmızı Işık (RLRL) tedavimizin geliştirilmesini sağladı.

Evde kolayca kullanılmak üzere tasarlanan Myproclear, girişimsel değildir. İlave ilaç, göz damlası veya kontak lens gerektirmez; bilinen önemli bir yan etkisi yoktur ve 3 ile 16 yaş arası çocuklar tarafından kullanımı uygundur.


3, 2, 5 kadar basit

Tedavi haftada 5 gün, günde 2 kez, 3 dakika tedavi süresince Myproclear cihazının içine bakmayı içerir; tedaviler arası minimum süre 4 saattir. Cihaz, basit bir dokunmatik ekranla kontrol edilir ve her çocuğun kullanımını izler. Tedavi eden doktor tarafından da izlenebilir ve hastanın velisine SMS anımsatma mesajları göndermek üzere programlanabilir.



Eyering Myproclear nasıl çalıřır?

Normal bir gözde mercekten geen ışığın odak noktası retinaya doğru bir şekilde ulaşır.

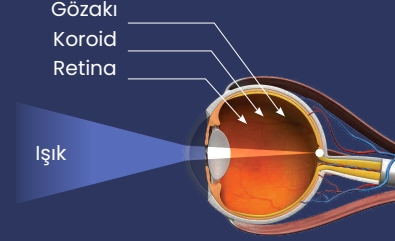


Retinaya doğru bir şekilde ulaşan odak noktası

Miyopi ilerledike eksenel (aksiyel) uzama ve odak noktası sapması artar. Sürekli eksenel uzama ve odak noktası sapması yüksek miyop gözlerle yol açar.



Retinaya ulaşmayan odak noktası

Eksenel uzunluğun daha da uzamasının yavaşlamasına yardımcı olmak ve miyobun ilerlemesini kontrol altına almak için kan akımı artırılır.

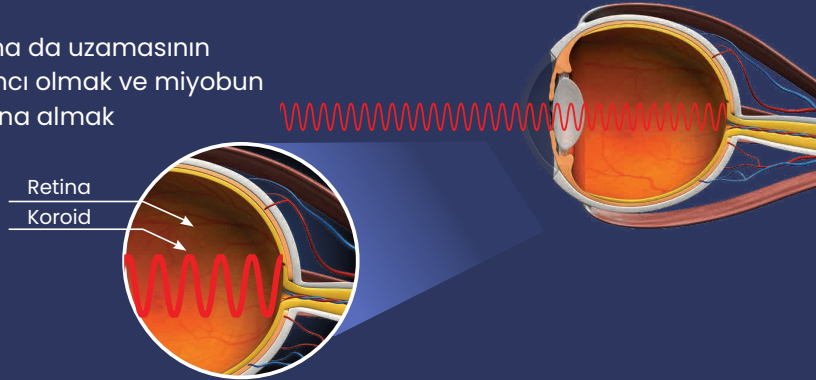

Oftalmolojide Dünya Liderleri Tarafından Geliştirilen Birinci Sınıf Teknoloji

Eyerising International, miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için yaşamı etkileyen göz sağlığı teknolojileri geliştiren Avustralya merkezli bir Tıbbi Teknoloji firmasıdır. Tıbbi Teknoloji inovasyonu, uygulaması ve klinik kolaylaştırmada kanıtlanmış başarılarla sahip dünyaca ünlü oftalmoloji akademisyenleri, araştırmacılar ve yönetim kurulundan oluşan bir ekip tarafından yönetilmektedir.



Eyerising Myproclear™

MİYOPLUK YÖNETİM CİHAZI

Miyopi Kontrolü Etkinliğinde %87,7'ye Varan Başarı!

senomed
international